

Medicintekniska produkter

Fastställt 20150601

**Användning av personlyft och lyftsele****Blankett för bekräftelse på ansvar vid användning**

Denna blankett har till syfte att säkerställa att varje omvårdnadspersonal eller motsvarande har tagit del och ansvarar för nedanstående:

- All användning av lyft och lyftsele skall ordinerars/förskrivas av arbetsterapeut. Undantag finns vid akuta situationer.
- I bruksanvisningen står hur lyft och lyftsele skall användas, skötas och rengöras. Det står också hur den dagliga funktionskontrollen ska utföras. Följ den.
- För varje vårdtagare som använder personlyft skall det finnas en individuell instruktion som arbetsterapeut ansvarar för. Där visas bland annat hur lyftselen skall placeras. Följ den.
- Du bör undvika att genomföra förflyttning med personlyft ensam. Läs i den individuella instruktionen för eventuellt särskilt behov.
- Vårdtagaren får ej lämnas ensam i lyften. Släpp inte kontakten med vårdtagaren.
- Planera förflyttningen genom att placera rullstol, mobil hygienstol, säng nära varandra så att du kan köra kortast möjliga sträcka med mobil lyft.
- Du skall alltid kontrollera att lyftselens öglor placerats rätt i lyft bygelns krokar, enligt instruktion. Kontrollera en extra gång när lyftselens band blivit sträckta vid lyftets början.
- Du ansvarar för att arbetsterapeut kontaktas om det uppstår förändrat behov eller problem uppstår vid förflyttning med personlyft. Detta gäller också om en avvikelse med personlyften inträffar.
- För att använda personlyft på ett säkert sätt skall du ha genomgått utbildning som givits av arbetsterapeut.

**Jag har fått utbildning och förstått innehållet på detta blad och i den övergripande rutinen för användning av personlyft och lyftsele.**

Namn: \_\_\_\_\_ personnr: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Arbetsterapeut \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Arbetsterapeut \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Enhetschef \_\_\_\_\_